

HUMIDIFICADOR REUTILIZÁVEL TR e MAK

MODELO

TR e MAK

NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 8185

REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** Flow Meter
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 0000XXXXX

DESCRIÇÃO

Os humidificadores para oxigenoterapia são dispositivos médicos que aumentam a humidade relativa nos tratamentos médicos com oxigénio, tanto nos hospitais como em casa.

Os humidificadores das séries TR200, MAK300, MAK500 REUSABLE são construídos com um recipiente de policarbonato e tampa com borbulhador, têm acessórios de latão cromado e podem ser esterilizados em autoclave (121°C 15 min).

Todos os modelos de humidificadores de caudal são testados e fabricados com uma pressão máxima de trabalho de 500 kPa (5 bar), bem acima da pressão média do sistema de distribuição.

Todos os componentes são livres de C.V.P. e látex natural.




TR200



MAK300

MAK500

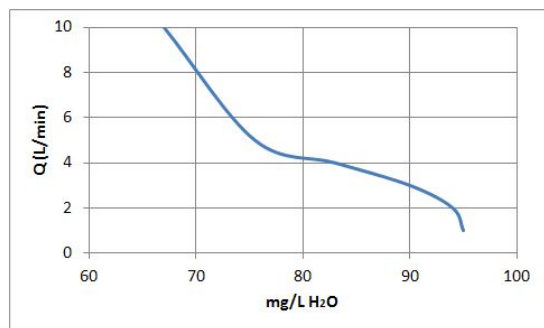

CONFIGURAÇÃO

Ligação de alimentação de O₂: ¼" ISO 3253 F; 3 /8" ISO 3253 F; M12x1.25 F; 9 /16" UNF F

Porta-tubos para a transferência de O₂ ao doente: Ø 6÷9 mm
Tubo de administração de O₂ (recomendado): Ø 6 mm – L= 2 m

Valor máximo de pressão aplicável: 500 kPa

Valor máximo de fluxo aplicável: 10 L/min

Condições ambientais de armazenagem: -40 °C ± 2 °C / +60 °C ± 5 °C e 40%÷70% de humidade relativa

Condições ambientais de utilização: +5 °C ± 2 °C / +35 °C ± 5 °C

Curva característica a 20 °C de humidificação do O₂ seco com tubo de administração L = 2 m

DIMENSÕES:

- TR 200: 190 mm x 75mm x 60mm

- MAK 300: 175mm x 81mm x 70mm

- MAK 500: 207mm x 81mm x 70mm

PESO:

- TR 200: 130g (sem carga)

- MAK 300: 145g (sem carga)

- MAK 500: 155g (sem carga)

GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	44455	1
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1

ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	GÁS	TIPO SAÍDA	UND. VENDA	REF ^a FT
168302	OLIVA SAÍDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - PT
168301	OLIVA SAÍDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - PT
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - PT
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - PT
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - PT
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - PT
168245	TUBO SILIC 14 CM P/ HUMIDIFIC. CCO (x10 und)	O2	-	10	
70087	TAMPA HUMIDIFICADOR TR200	O2	-	1	